

ANNEAU DE TENSION CAPSULAIRE PRÉCHARGÉ

Pre-Tension® est un système proposant un anneau de tension capsulaire préchargé dans un injecteur à usage unique. L'anneau est prépositionné dans l'injecteur et conçu pour un chargement automatisé pour le confort du chirurgien. **Pre-Tension®** est un dispositif médical de haute précision pour une insertion dans le

sac capsulaire. Il est fabriqué à partir de polyméthylméthacrylate (PMMA) hautement flexible.


Le système **Pre-Tension®** est fourni dans un blister stérile, prêt à l'emploi. **Pre-Tension®** est indiqué pour la stabilisation du sac capsulaire en cas de faiblesse zonulaire.

→ Avantages

- Facile à utiliser
- Expansion circulaire et stabilisation du sac capsulaire
- Centrage sûr de l'implant en cas de déhiscence zonulaire
- Évite le décentrement de l'implant après rétrécissement du sac
- Stabilisation pendant la phacoémulsification
- Réduction du risque de fibrose capsulaire




→ Caractéristiques


RÉFÉRENCE	CTRL1311	
DÉSIGNATION	Anneau de tension préchargé 13/11	
COMPRESSION	de 13 mm à 11 mm	
MATÉRIAU	PMMA / Flexible	

→ Mode d'emploi

- 1 Pousser la tige-poussoir vers l'avant jusqu'au bout de sa course.

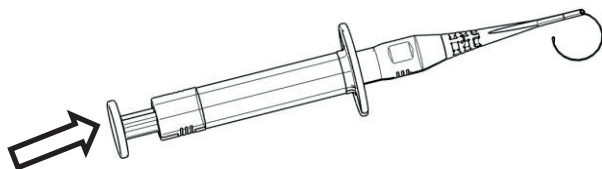

- 2 Insérer lentement l'anneau de tension capsulaire dans la pointe de l'injecteur.

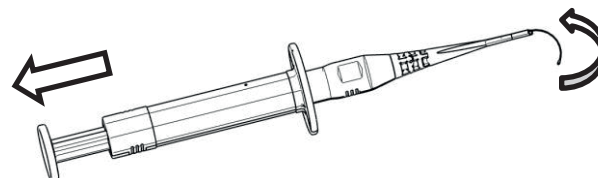

- 3 L'anneau de tension capsulaire est complètement inséré dans la pointe de l'injecteur.

