

Pre-Tension®



ANNEAU DE TENSION CAPSULAIRE PRÉCHARGÉ

Pre-Tension® est un système proposant un anneau de tension capsulaire préchargé dans un injecteur à usage unique.

Pre-Tension® est un dispositif médical permettant une insertion dans le sac capsulaire. Il est fabriqué à partir de polyméthylméthacrylate (PMMA) hautement flexible.

Le système **Pre-Tension®** est fourni dans un blister stérile, prêt à l'emploi.


Pre-Tension® est indiqué pour la stabilisation du sac capsulaire en cas de faiblesse zonulaire.



→ Indications



L'anneau de tension capsulaire est utilisé pendant l'opération chirurgicale de la cataracte par capsulorhexis et avant l'insertion d'une lentille intraoculaire pour maintenir l'intégrité capsulaire, prévenir les plis de la capsule postérieure et résister à la rétraction capsulaire.

→ Caractéristiques

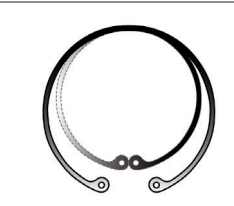RÉFÉRENCE	CTRL1311	
DÉSIGNATION	Anneau de tension préchargé 13/11	
COMPRESSION	de 13 mm à 11 mm	
MATÉRIAU	PMMA / Flexible	

→ Mode d'emploi

- 1 Pousser la tige-poussoir vers l'avant jusqu'au bout de sa course.
- 2 Insérer lentement l'anneau de tension capsulaire dans la pointe de l'injecteur.

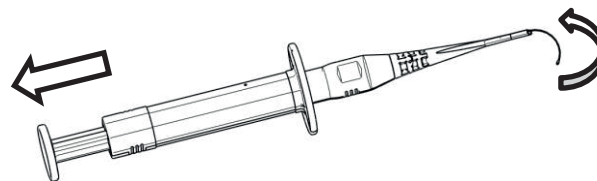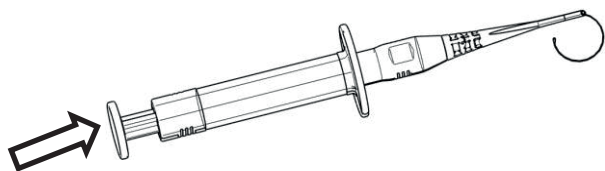

- 3 L'anneau de tension capsulaire est complètement inséré dans la pointe de l'injecteur.

