

Avansee™ Preset

REF. CLEAR : PU6AS / REF. JAUNE : PN6AS




→ Caractéristiques techniques

TYPE	Monofocal - Préchargé
MATÉRIAU	Optique : acrylique hydrophobe Haptiques : polyvinylidene fluorure (PVDF) Filtre UV (version jaune avec filtre de lumière bleue)
DESIGN	3 pièces / Bords carrés à 360° (optique)
HAPTIQUES	Anses en C
OPTIQUE	Biconvexe / Asphérique
ASPHÉRICITÉ	-0.04 μm
TAILLE D'INCISION RECOMMANDÉE	2.4 mm (sclérocornéen) / 2.6 mm (cornée)
DIAMÈTRE OPTIQUE / DIAMÈTRE TOTAL	6.00 mm / 13.00 mm
ANGULATION	5°
INDICE DE RÉFRACTION	1.519
PUISSANCE (DIOPTRIE)	+ 6.0 D à + 10.0 D par pas de 1.0 D + 10.0 D à + 26.0 D par pas de 0.5 D
CONSTANTE A	Optique : 119.0 / Ultrasonique : 118.7

CONSTANTES (FABRICANT)

HAIGIS	$a_0 = 1.57 / a_1 = 0.4 / a_2 = 0.1$	BARRETT	DF = 5 / LF = 1.88
HOFFER Q	pACD = 5.64	HOLL.	sf = 1.85
SRK/T	A = 119.0	SRK II	A = 119.3


DÉNOMINATION : AVANSEE™ PRESET (JAUNE) ET AVANSEE™ PRESETUV (INCOLORE). DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIB.
FABRICANT : KOWA COMPANY LTD (JAPON). DISTRIBUTEUR : OPHTHA-FRANCE. ORGANISME NOTIFIÉ : TÜV RHEINLAND.
CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ. POUR UN BON USAGE DU PRODUIT,
MÉRCI DE VOUS REPORTER À LA NOTICE DU PRODUIT.

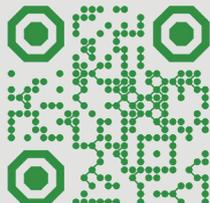

→ Schémas techniques

DIAMÈTRE OPTIQUE	DIAMÈTRE TOTAL	DIOPTRIE
6.00 mm	13.00 mm	de + 6.0 D à + 26.0 D

L'AVANSEE™ PRESET,
VUE DE FACE →

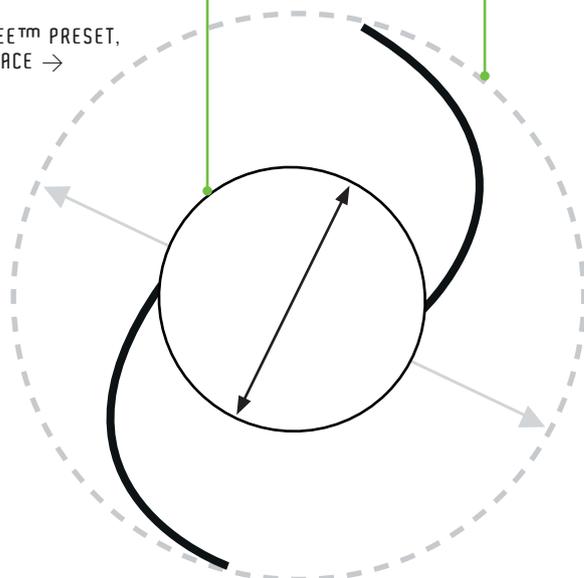

ANGULATION 5°
BORDS CARRÉS À 360°

← L'AVANSEE™ PRESET,
VUE EN COUPE

→ Système d'injection

L'implant Avanse™ Preset est préparé pour l'injection en 3 étapes :



Étape 1 : Hydratation de la lentille

Insérer le viscoélastique dans l'orifice situé sur la cassette de l'injecteur. Remplir l'embout jusqu'aux pointillés indiqués sur l'image ; injecter au moins 0.15 ml environ.

Étape 2 : Préparation à l'implantation

Tout en tenant fermement la partie du corps de l'injecteur, retirer lentement la protection du corps de l'injecteur en gardant une position droite pour ne pas déformer la lentille.

Étape 3 : Implantation

Pousser le piston à un rythme constant pour faire avancer la LIO jusqu'à ce que l'optique de la LIO soit enroulée et que ses bords établissent un contact sécurisé. Une fois le piston avancé, la LIO doit être insérée dans l'œil dans les 20 secondes.



← INJECTEUR POUR
L'AVANSEE™ PRESET