


Avansee™ Preload1P

REF. CLEAR : CP22V / REF. JAUNE : YP22V

Version Jaune
YP22U

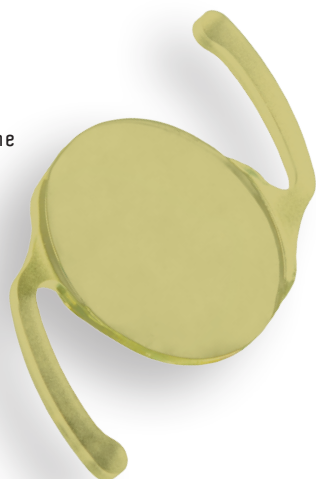

Version Clear
CP22U




→ Caractéristiques techniques

TYPE	Monofocal - Préchargé
MATÉRIAU	Acrylique hydrophobe Filtre UV (version jaune avec filtre de lumière bleue)
DESIGN	Monobloc / Bords carrés à 360°
HAPTQUES	Anses en C
OPTIQUE	Biconvexe / Asphérique
ASPHÉRICITÉ	-0.04 μ m
TAILLE D'INCISION RECOMMANDÉE	2.2 mm (sclérocornéen) 2.4 mm (cornée)
DIAMÈTRE OPTIQUE / DIAMÈTRE TOTAL	6.00 mm / 13.00 mm
ANGULATION	0°
INDICE DE RÉFRACTION	1.519
PUISSANCE (DIOPTRIE)	+ 6.0 D à + 10.0 D par pas de 1.0 D + 10.0 D à + 26.0 D par pas de 0.5 D
CONSTANTE A	Optique : 119.0 / Ultrasonique : 118.6

CONSTANTES (FABRICANT)

HAIGIS	$a_0 = 1.557 / a_1 = 0.4 / a_2 = 0.1$	BARRETT	DF = 5 / LF = 1.90
HOFFER Q	pACD = 5.69	HOLL.	sf = 1.87
SRK/T	A = 119.03	SRK II	A = 119.32


DÉNOMINATION : AVANSEE™ PRELOAD1P (JAUNE) ET AVANSEE™ PRELOAD1P CLEAR. DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIB.
FABRICANT : KOWA COMPANY LTD (JAPON). DISTRIBUTEUR : OPHTHA-FRANCE. ORGANISME NOTIFIÉ : TÜV RHEINLAND.
CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ. POUR UN BON USAGE DU PRODUIT,
MERCI DE VOUS REPORTER À LA NOTICE DU PRODUIT.

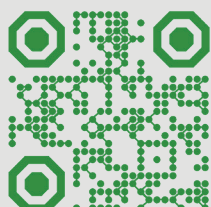

→ Schémas techniques

DIAMÈTRE OPTIQUE	DIAMÈTRE TOTAL	DIOPTRIE
6.00 mm	13.00 mm	de + 6.0 D à + 26.0 D

L'AVANSEE™
PRELOAD1P,
VUE DE FACE →

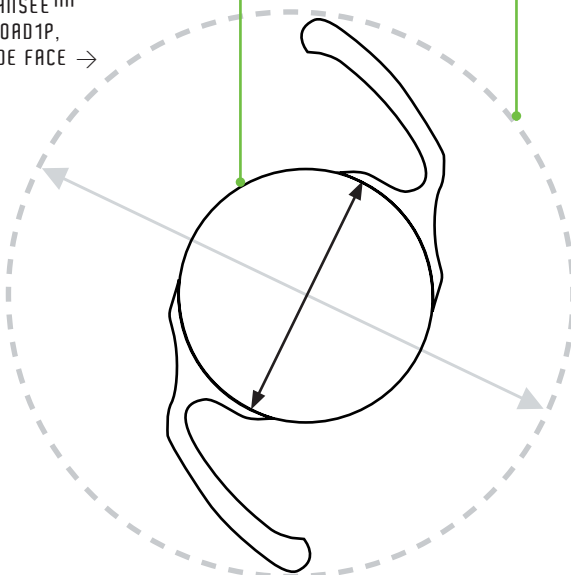


ANGULATION 0°

BORDS CARRÉS À 360°


← L'AVANSEE™ PRELOAD1P,
VUE EN COUPE

→ Système d'injection

L'implant Avanse™ Preload1P est préparé pour l'injection en 3 étapes :

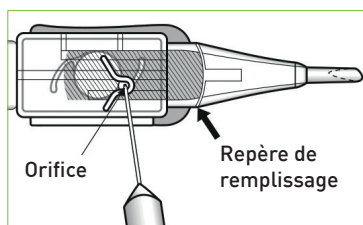**Étape 1 : Hydratation de la lentille**

Insérer le viscoélastique dans l'orifice situé sur la cassette de l'injecteur. Remplir l'embout jusqu'au repère de remplissage indiqué sur l'image.

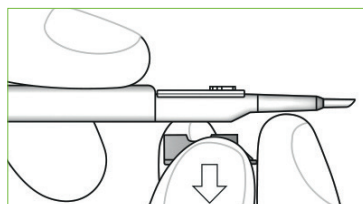
**Étape 2 : Préparation à l'implantation**

Tout en tenant fermement la partie du corps de l'injecteur, retirer lentement la protection du corps de l'injecteur en gardant une position droite pour ne pas déformer la lentille.

**Étape 3 : Implantation**

Pousser le piston à un rythme constant pour faire avancer la LIO jusqu'à ce que l'arrière de la lentille atteigne le repère d'attente indiqué. Une fois le piston avancé, la LIO doit être insérée dans l'œil dans les 20 secondes.

Le biseau de la pointe de l'injecteur doit être orienté vers le bas pendant toute la procédure.

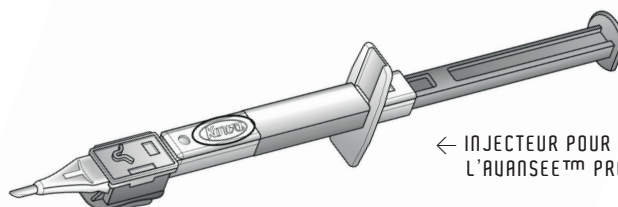

← INJECTEUR POUR
L'AVANSEE™ PRELOAD1P