


Avansee™ Preload1P Toric

REF. CLEAR : CPTX / REF. JAUNE : YPTX

Version Jaune
YPTX

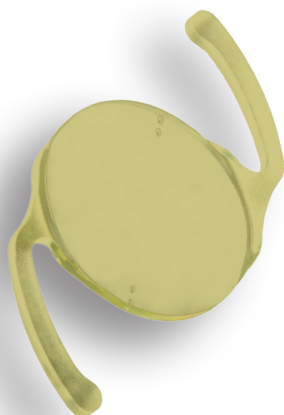

Version Clear
CPTX




→ Caractéristiques techniques

TYPE	Monofocal / Torique - Préchargé	
MATÉRIAU	Acrylique hydrophobe Filtre UV (Version jaune avec filtre de lumière bleue)	
DESIGN	Monobloc / Bords carrés à 360°	
HAPTQUES	Anses en C	
OPTIQUE	Biconvexe / Asphérique	
ASPHÉRICITÉ	-0.04 µm	
TAILLE D'INCISION RECOMMANDÉE	2.2 mm [sclérocornéen] / 2.4 mm [cornée]	
DIAMÈTRE OPTIQUE / DIAMÈTRE TOTAL	6.00 mm / 13.00 mm	
ANGULATION	0°	
INDICE DE RÉFRACTION	1.519	
PUISSANCE (DIOPTRIE)	+ 6.0 D à + 10.0 D par pas de 1.0 D + 10.0 D à + 26.0 D par pas de 0.5 D	
PUISSANCE CYLINDRIQUE SELON MODÈLES	Plan implant :	Plan cornéen :
	AT2 : 0.75 D AT3 : 1.50 D AT4 : 2.25 D AT5 : 3.00 D AT6 : 3.75 D AT7 : 4.50 D AT8 : 5.25 D AT9 : 6.00 D	AT2 : 0.50 D AT3 : 1.00 D AT4 : 1.50 D AT5 : 2.00 D AT6 : 2.50 D AT7 : 3.00 D AT8 : 3.50 D AT9 : 4.00 D
CONSTANTE A	Optique : 119.0 / Ultrasonique : 118.6	

CONSTANTES (FABRICANT)			
HAIGIS	a0 = 1.557 / a1 = 0.4 / a2 = 0.1	BARRETT	DF = 5 / LF = 1.90
HOFFER Q	pACD = 5.69	HOLL.	sf = 1.87
SRK/T	A = 119.03	SRK II	A = 119.32


DÉNOMINATION : AVANSEE™ PRELOAD1P TORIC (JAUNE) ET AVANSEE™ PRELOAD1P TORIC CLEAR. DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIB. FABRICANT : KOWA COMPANY LTD (JAPON). DISTRIBUTEUR : OPHTA-FRANCE. ORGANISME NOTIFIÉ : TÜV RHEINLAND. CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ. POUR UN BON USAGE DU PRODUIT, MERCI DE VOUS REPORTER À LA NOTICE DU PRODUIT.

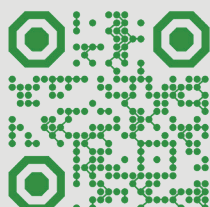

→ Schémas techniques

DIAMÈTRE OPTIQUE	DIAMÈTRE TOTAL	DIOPTRIE
6.00 mm	13.00 mm	de + 6.0 D à + 26.0 D

L'AVANSEE™
PRELOAD1P TORIC,
VUE DE FACE →

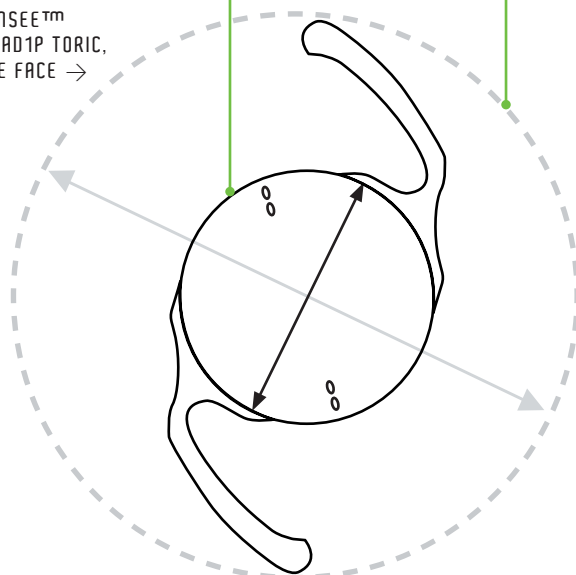


ANGULATION 0°

BORDS CARRÉS À 360°

← L'AVANSEE™
PRELOAD1P TORIC,
VUE EN COUPE


→ Système d'injection

L'implant Avanse™ Preload1P Toric est préparé pour l'injection en 3 étapes :

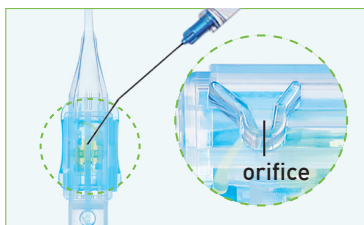

Étape 1 : Hydratation de la lentille

Insérer le viscoélastique dans l'orifice situé sur la cassette de l'injecteur. Remplir l'embout jusqu'aux pointillés indiqués sur l'image; injecter au moins 0.17 ml environ.

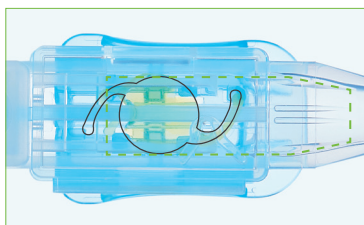


Étape 2 : Préparation à l'implantation

Tout en tenant fermement la partie du corps de l'injecteur, retirer lentement la protection du corps de l'injecteur en gardant une position droite pour ne pas déformer la lentille.



Étape 3 : Implantation

Pousser le piston à un rythme constant pour faire avancer la LIO jusqu'à ce que l'optique de la LIO soit enroulée et que ses bords établissent un contact sécurisé. Une fois le piston avancé, la LIO doit être insérée dans l'œil dans les 20 secondes.

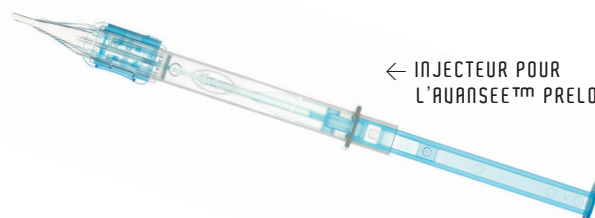

← INJECTEUR POUR
L'AVANSEE™ PRELOAD1P